



### 3.0 Instrucciones de funcionamiento

Conecte el cable de alimentación por medio de la abrazadera (clip). Conecte el faro al "Battery Pack" y enciéndalo.

Si desea continuar con el examen sin pausa para recargar la batería, conecte el conector de DC del cargador de la batería y simplemente enchufe el cargador a la red eléctrica.

### 4.0 Uso y cuidado de la batería

La capacidad de las baterías recargables de Li-ion pueden degradarse por la temperatura ambiental. La temperatura

adecuada es (10°C~40°C). No exponga la batería a

temperaturas extremas; si la batería se utiliza en altas o bajas temperaturas, la capacidad de la batería se reducirá. Deseche la batería gastada de forma segura.

### 5.0 Limpieza y esterilización

La superficie exterior del instrumento puede limpiarse con un paño húmedo, el resto de las manchas se pueden

limpiar con una mezcla de 50% alcohol y 50% de agua destilada. No limpie con cualquier detergente corrosivo para evitar dañar la superficie.

Limpieza del lente : Papel de limpieza de Espejos o una gota de líquido disolvente (50% de alcohol y 50% de eter) puede ser utilizados para limpiar el lente,. Si hay polvo en el lente, sople cuidadosamente o limpiarlo con un cepillo pequeño para el polvo.



### 6.0 ESPECIFICACIONES

<i>Iluminación</i>	> 22,000 lux @ 30 cm
<i>Vida del LED</i>	>40,000 hours
<i>Color de Temperatura</i>	4,000 °K
<i>Indice de Interpretación, color</i>	92 Típico
<i>Degradación Temporal de Luz</i>	Cero
<i>Tamaño del Haz de Luz</i>	60 mm @ 300 mm de distancia
<i>Atenuación de Iluminación</i>	3% to 100%
<i>Tiempo de Operación</i>	>10 horas típicas a intensidad máxima
<i>Tiempo de Recarga Normal</i>	3.6 horas
<i>Tiempo de Recarga Rápida</i>	2 horas, para 8 horas de intensidad máxima

Cargador de Batería *Universal: 100 - 264 VAC,  
50 - 60 Hz., 8.4 VDC @ 1.3  
A*

Peso (Cabeza de Luz) 23 gramos

Peso (Battery Pack) 190 gramos

Tamaño (Battery Pack) 104 mm x 66 mm x 27 mm

## 7.0 Símbolos



Fuente de alimentación eléctrica interna



Clase II



## 8.0 Advertencias y precauciones



## 9.0 Lista de componentes de repuesto

Pieza	Cantidad	Descripción	No. de Parte
1	1	Clips, bolsa de dos	IL-2323
2	1	Battery Pack (controller)	IL-2324
3	1	Gafas de Seguridad	IL-2328
4	1	Filtro Amarillo	IL-2322
5	1	Cargador de Batería	IL-2327